

Fashion Style accessories

Інструкція використання:

аксесуару для догляду за контактними лінзами
«УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ОЧИЩУВАЧ HL-988»

1. Помістіть окремо ліву (L) та праву (R) контактну лінзу у відповідну ячейку контейнера для зберігання лінз.
2. Налийте універсальний розчин у скляну чашку ультразвукового очищувача HL-988 до позначеної лінії.
3. Швидко 2 рази натисніть кнопку живлення, яка знаходиться зверху кришки ультразвукового очищувача HL-988. Він почне працювати, а через 3 хвилини зупиниться автоматично.

Спосіб використання:

Ультразвуковий очищувач HL-988 можна використовувати для очищення всіх типів м'яких контактних лінз, застосовуючи будь-який багатоцільовий розчин для контактних лінз.

Правила експлуатації ультразвукового очищувача HL-988:

1. Промивайте скляну чашку для розчину та контейнер для зберігання контактних лінз чистою кип'яченою водою до та після використання ультразвукового очищувача HL-988.
2. Наливаючи розчин для контактних лінз у скляну чашку, слідкуйте аби її рівень не перевищував позначену лінію, а чітко відповідав їй.
3. Не допускайте потрапляння води на кришку ультразвукового очищувача HL-988, аби запобігти пошкодженню його електронної частини.
4. У випадку необхідності закінчити очищення контактних лінз заздалегідь, натисніть кнопку живлення один раз.
5. Використовуйте ультразвуковий очищувач HL-988 виключно для очищення м'яких контактних лінз.
6. Під час роботи пристрою індикатор світиться. Після завершення циклу очищення індикатор гасне. Коли пристрій розряджається, індикатор блимає і через деякий час гасне. Протягом заряджання індикатор блимає. Коли пристрій

- повністю заряджено, індикатор горить постійно.
- Цикл очищення контактних лінз в ультразвуковому очищувачі HL-988 триває 3 хвилини.
 - Звичайний час повного заряджання цього пристрою становить 2 години. Після повного зарядження ультразвуковий очищувач HL-988 можна безперервно використовувати протягом 5 годин.

Розмір продукту:

Модель №.	HL-988	Зарядний пристрій	5V
Розмір	+ - 41*87 мм	Ємність	0.24W
Акумулятор	300 мА	Час прибирання	3хв
Ємність контейнера	7мл	Вага нетто	78г

Рекомендації використання ультразвукового очищувача HL-988

- Очищайте в пристрої свої контактні лінзи 3-4 рази на тиждень.
- Після кожного використання виливайте багаточітковий розчин зі скляної чашки.
- Для збереження контактних лінз в ультразвуковому очищувачі HL-988, наповніть його скляну чашку новою порцією чистого розчину для контактних лінз.

Технічне обслуговування:

1. Після завершення заряджання від'єднайте штекер USB.
2. Після завершення очищення вилийте розчин для контактних лінз і протріть скляну чашу для розчину чистою тканиною.
3. Помістіть ультразвукового очищувача HL-988 в сухе місце з належною температурою.

Fashion Style
accessories



Назва продукції: Аксесуари для догляду за контактними лінзами.

 NINGBO KAIDA RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.,
58 SHUNSHUI SOUTH ROAD, EAST INDUSTRIAL ZONE,
MOUSHAN, YUYAO, ZHEJIANG, CHINA / НІНГБО КАІДА
РАББЕР ЕНД ПЛАСТИК ТЕКНОЛОДЖІ КО., ЛТД,
58 ШУНШУЙ СОУЗ РОАД, ІСТ ІНДАСТРІАЛ ЗОНЕ, МОУШЕН,
ЮЯУО ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «ВІЖНПЛАС ЮКРЕЙН», 49000, Україна, м.Дніпро,
вул.Філософська, б.84, корп.25, оф.117. тел. 0 800 330 297.

УВАГА! При купівлі нових контактних лінз необхідно міняти контейнер.
Рекомендовано офтальмологами.

 LOT ПАРТІЯ KFS06-22

 06.2022р.

